

## Naudojimo instrukcija

### Didžiojo piršto atvedėjas



Unikalus kodas (UDI-DI): 59017804DRIDQ4

Naktinis korekcinis aparatas, skirtas Hallux Valgus deformacijai. Rekomenduojama naudoti naktį, ant basos kojos. Naudojamas kojos nykščio kaulo iššokimo profilaktikai ir gydymui.

#### Indikacijos:

- Hallux Valgus deformacijos profilaktika.

#### Kontraindikacijos:

- Atsiradę odos pokyčiai naudojant produktą.

#### Naudojimas:

Įstatykite nykštį į įtvarą ir pritvirtinkite Velcro juostelėmis, kad rėmai būtų tarp didžiojo ir antrojo pirštų. Produkto efektyvumas gali būti žymiai didesnis, jei kartu naudosite Qmed HalluFit treniruoklį, kurio pagalba atpalaiduosite įtemptus raumenis aplink pirštą. Pabandykite padidinti judesio amplitudę lenkdami ir tiesdami pirštą, judindami pirštus link kūno vidurio linijos, taip išplečiant sutrumpėjusį raištį

Labai rekomenduojama pradėti naudoti produktą palaipsniui, palaipsniui trumpinti ir “Velcro” juostų ilgį. Norint užtikrinti ilgesnį naudojimo komfortą, naudojamos antibakterinės, kvėpuojančios ir patvarios putos.

#### Priežiūra:

Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Švelniai plauti rankomis muilu arba šampūnu su šiltu vandeniu. Prieš dėvėdami nusauskite.

**DĖMESIO!!!** Negalima vaikščioti dėvint Hallux Valgus atvedėją. Atvedėjas skirtas naudojimui atsigulus ar atsisėdus.

#### Sudėtis:

Įtvaras: PC

Apsauginis pamušalas: EVA+PU

Velcro juostelė: nailonas

Pakuotės turinys: 1 pora

Dydis: universalus

#### Gamintojo adresas:

mdh Sp. z o.o.

ul. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: [profilaktyka@mdh.pl](mailto:profilaktyka@mdh.pl)