

Naudojimo instrukcija

Hallux Valgus treniruoklis Hallufit



Unikalus kodas (UDI-DI): 59017804DRIF0DJV

Tai tamprus Hallux Valgus treniruoklis, kuris padeda atkurti natūralią pėdos padėtį ir turi korekcinį poveikį. Korekcijos metu didysis pirštas išlaiko taisyklingą padėtį.

Indikacijos: Hallux Valgus deformacijos profilaktika.

Kontraindikacijos: Odos pokyčiai naudojant produktą.

Naudojimas: Sėdėdami užsidėkite HalluFit ant abiejų didžiųjų pirštų, kulnas nukreiptas žemyn. Pakartotinai judinkite abi kojas į išorę ir į vidų. Ilginkite laiką palaipsniui, po 3-7 minutes kiekvieną kartą, naudoti bent du kartus per dieną. Nenaudoti, jei atsiranda diskomfortas.

Priežiūra: Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Švelniai plauti rankomis muilu arba šampūnu su šiltu vandeniu.

Sudėtis: EVA + nailoninė elastinė juosta

Pakuotės turinys: 1 vnt.

Dydis: universalus

Šiuo metu HalluFit yra juodos ir oranžinės spalvos

Gamintojo adresas:

mdh Sp. z o.o.

ul. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl