

## KAKLO ĮTVARAI KR 0-12-1 / KR 0-13 CERVICAL ORTHOSES KR 0-12-1 / KR 0-13

**Rekomenduojamas,** esant vaikų kreivakaklystei; suaugusiųjų ir vaikų kaklo srities osteochondrozei, sausgyslių, raumenų, nervų ligoms; reabilitacijos laikotarpiu po kaklo srities stuburo traumų, raumenų, raiščių, sausgyslių patempimo, plyšimo, slankstelių pasislinkimo; po kaklo srities operacijų.

Are used for treatment of neck area osteochondrosis, tendon, muscle and nerve diseases.

They should be used with conjunction with other therapies and is partial immobilization device in the rehabilitation period after neck area spinal column trauma.

**KR 0-12-1****KR 0-13**

**Sudėtis:** 62% medvilnė, 33% poliamidas, 5% elastanas.

**Composition:** 62% cotton, 33% polyamide, 5% elastane.

**Dydis.** Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

**Size.** In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see table below). Orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



<b>KR 0-12-1</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
cm	30-32	32-34	34-37	37-41	41-44	44-47
<b>KR 0-13</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	
cm	20-22	22-23	23-24	24-26	26-29	

### Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

### Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

### Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

**Garantija** suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

**The warranty** is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

**Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.**

**Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.**

### Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

### Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TEHNIKA

Pateikiama informacija  
paskutinį kartą peržiūrėta 2019-11-27