

Naudojimo instrukcija

Qmed ergoterapinė masė



Unikalus kodas (UDI-DI): 59017804DRQM3MNK

Ergoterapinė masė idealiai tinka rankų ir pirštų reabilitacijai. Reguliariai mankštinantis sumažėja pirštų, plaštakos ir riešo sąnarių skausmas ir sąstingis, taip pat pagerėja tarpfalanginių sąnarių ir riešo judesių amplitudė ir padedama atstatyti sutrikusias funkcijas. Puikiai tinka reabilitacijos laikotarpiu, sergant degeneracinėmis plaštakos ligomis, po traumų, susilpnėjus dilbio ir plaštakos raumenims.

Rankos pratimai naudojant ergoterapinę masę susideda iš medžiagos ridenimo išorine ir vidine plaštakos pusėmis, masės traiškymo, suspaudimo ar spaudimo vienu pirštu. Masė pagaminta iš netoksiško silikono.

Galimi keturi stiprumo lygiai, kurie skiriasi spalva:

- Ypač minkšta (žalia);
- Minkšta (geltona);
- Vidutinio kietumo (raudona);
- Kieta (mėlyna).

Indikacijos:

- Reumatoidinis artritas, artritas, riešo kanalo sindromas, tendinitas, tenisininko alkūnė, sveikimas po piršto ar riešo lūžio ar sausgyslių operacijos;
- Treniruotę papildžius pratimais, kuriuose naudojamas rankų ir pirštų svoris, padedama išvengti traumų ir sumažinti raumenų disbalansą;
- Sąlygos, kurioms reikia didesnio pirštų ir griebimo funkcijos stiprumo.

Kontraindikacijos:

- Negalima naudoti pacientams, kurių pojūčiai yra sutrikę; žmonėms, turintiems odos pažeidimų, tokių kaip opos, pūslės, įbrėžimai ir pan.;
- Skausmo atsiradimas pratimų metu;
- Būklė iškart po patempimų ir kaulų lūžių;
- Sinostozė;
- Sąnarių ir periartikuliarinių audinių uždegimas;
- Edema;
- Ankstyvi randai po operacijos ar kitos žaizdos.

Sudėtis: 100% silikonas

Svoris: 80 g.

Gamintojo adresas:

mdh Sp. z o.o.

ul. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl