

Naudojimo instrukcija

Masažinis volelis

Unikalus kodas: 59017804DRQM3PNR

- Padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis;
- Atpalaiduoja įtemptus ir pavargusius pėdų raumenis;
- Lengvai naudojamas.

Qmed masažinis volelis puikiai tinka tiek pėdų, tiek viso kūno masažui. Dėl ergonomiškos formos ir masažuojančių dygliukų padidėja slėgis ir malonus masažo efektas. Jis yra universalus ir turi terapinį poveikį atpalaiduojant įsitempusius raumenis. Be to, jis užtikrina tinkamą kraujotaką ir malšina visų rūšių skausmą. Šis nešiojamas volelis rekomenduojamas žmonėms, dirbantiems stovimą darbą ir esant didelėms fizinėms apkrovoms. Masažuokliu tereikia pradėti ridinti kojas ar kitas kūno dalis, kad dar labiau stimuliuotumėte spaudimo taškus.

Indikacijos:

- Skausmas kojose, rankose;
- Plokščiapėdystė;
- Riešo kanalo sindromas;
- Ribotas čiurnos sąnario mobilumas.

Kontraindikacijos:

- Nenaudoti pacientams, kurių jutimas yra sutrikęs, ir turintiems odos pažeidimų, tokių kaip opos, pūslės, įbrėžimai ir kt.

Priežiūra: nuplauti drungnu vandeniu su muilu. Džiovinti atokiau nuo dirbtinių šilumos šaltinių.

Dydis: 17cm x 7cm

Sudėtis: TPE, PP

Gamintojo adresas:

mdh Sp. z o.o.

ul. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl