

# GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



## KLUBŲ ABDUKCINIS ĮTVARAS FP 2 / HIP ABDUCTION ORTHOSIS FP 2

**Rekomenduojamas**, esant klubo sąnario displazijai.  
**Recommended** in case of dysplasia.

**Sudėtis:** 95% medvilnė, 5% poliamidas.

**Composition:** 95% cotton, 5% polyamide.

**Dydis.** Įtvaro dydį nustato gydytojas.

**Size.** If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
cm	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

**Svarbu!** Atkreipkite dėmesį, ar užsegus įtvaro dirželius kūdikis gali išsitiesti. Esant poreikiui, įtvaro dirželius galima pailginti. Jei išnaudojus visą dirželių ilgį, kūdikis vis tiek negali išsitiesti, tai reiškia, kad įtvaras per mažas ir jį būtina nedelsiant keisti.

### Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju.

### Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it.

### Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegę. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to hand-wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed.

**Garantija** suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

**The warranty** is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

**Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.**

**Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.**

### Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

### Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija  
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-01-10