

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



KRŪTINĖS - JUOSMENS ĮTVARAS KR 1-17 THORACO-LUMBO-SACRAL ORTHOSIS KR 1-17

Rekomenduojamas ydingai laikysenai koreguoti; esant stuburo osteochondrozei, osteoporozei bei įvairioms osteochondropatijoms; nervų, raumenų, raiščių uždegimui; po lengvų stuburo krūtininės srities traumų (sumušimų, patempimų).

Recommended for the correction of defective postures, osteochondrosis, osteoporosis and osteochondropathies; it can also be used, in conjunction with other therapies, in the treatment of spinal columns in the thorax area.

Sudėtis: 52 % poliamidas, 22 % medvilnė, 16 % guma, 10 % poliesteris.

Composition: 52 % polyamide, 22 % cotton, 16 % rubber, 10 % polyester.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. In order the product performs its functions effectively correct size has to be chosen (see Table below). Orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
a, cm	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
h, cm	36-41	38-43	40-45	42-47	44-49	46-51	47-52	48-53

Rekomendacijos: Dėl įtvairo dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nepatartina gaminio dėvėti ant nuogo kūno. Nedėvėkite įtvairo, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Kai gaminys skirtas ydingai laikysenai koreguoti, įtvairą dėvėkite sėdint ir nedėvėkite jo, aktyviai judėdami ar sportuodami. Siūlome pasikonsultuoti su gydytoju dėl gydymosi mankštos ir masažo tikslingumo.

Recommendations: Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvairą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TEHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16