

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS KT 0-2-0 ANKLE – FOOT ORTHOSIS KT 0-2-0

Rekomenduojamas, esant čiurnos sąnario raiščių, sausgyslių, sąnarinės kapsulės patempimui, plyšimui bei čiurnos sausgyslių, raumenų, nervų, antkaulio uždegimui; taip pat reabilitacijos laikotarpiu po čiurnos sąnario operacijų ir kaulų lūžimo. Įtvaras sutvirtina čiurnos sąnarį, sumažina traumų pasikartojimo tikimybę.

The orthosis fastens ankle joint especially well due to plastic splints and special double lacing. Used in cases of strain, rupture of ankle joint ligaments, tendons, joint capsule and inflammation of ankle tendons, muscles, nerves as well as during rehabilitation period after ankle joint operations and bones fractures.



Sudėtis: 100% poliesteris.

Composition: 100% polyester.



	XS	S	M	L	XL
cm	20-24	24-28	28-32	32-36	36-39

Dėvėjimas:

1. Taisyklingai suvarstykite įtvarą (1a ir 1b pav.).
2. Jeigu reikalingas mažesnis laipsnis sutvirtinimas, ištraukite šoninius fiksatorius (2 pav.).

Directions for use:

1. Correctly lace the orthosis (see Picture 1a, 1b).
2. If you need a lower degree of support, remove the lateral splints (see Picture 2).

Rekomendacijos:

Dėl įtvoro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju.

Nedėvėkite įtvoro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus arba sergate venų ligomis.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it.

Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitisations or if you suffer from vein disorders.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Prieš skalbdami, iš gaminio ištraukite metalinius fiksatorius. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt, www.ortopedija.lt


Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com

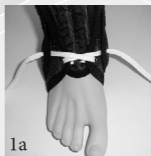

ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-01-10