

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS KT 0-2-2 ANKLE – FOOT ORTHOSIS KT 0-2-2

Rekomenduojamas, esant čiurnos sąnario nestabilumui, raiščių patempimui, uždegimui; reabilitacijos laikotarpiu po čiurnos sąnario operacijų, raiščių plyšimo. Įtvaras pagamintas iš tvirto, laidaus audinio (tinklelio), kuris yra itin plonas, todėl koja su įtvaru lengvai telpa į avalynę.

Recommended in case of the ankle joint instability, ligament strain, inflammation; rehabilitation period after ankle joint operation, ligaments rupture. Orthosis is made from strong, breathable and extremely thin fabric. So foot with orthosis can be easily fit into footwear.



Sudėtis: 100% poliesteris.

Composition: 100% polyester.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



	XS	S	M	L	XL
cm	20-24	24-28	28-32	32-36	36-39

Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Įtvarą dėvėkite ant kojinių.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Orthosis recommended to wear on the sock.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminyje naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2019-11-29