

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

USER'S MANUAL



KELIO ĮTVARAS KT 3-8-1 / KNEE ORTHOSIS KT 3-8-1

Rekomenduojamas, esant kelio sąnario uždegimui, gonartrozei, raiščių bei sausgyslių patempimui, nedidelio laipsnio raiščio nestabilumui, girnelės osteochondropatijai; reabilitacijos laikotarpiu po sąnario lūžio, raiščių plyšimo, taip pat po kelio sąnario operacijų. Sutvirtina ir šildo kelio sąnarį.

Recommended for inflammation of the knee joint, gonarthrosis, sprains of ligaments and tendons, slight instability of the ligament, osteochondropathy of the patella; during rehabilitation after joint fracture, ligament rupture, as well as after knee surgery. Strengthens and warms the knee joint.

Sudėtis: 90% polimerinis audinys, 10% medvilnė.

Composition: 90% polymer material, 10% cotton.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.

Size. If you want the product to perform its functions effectively, it is necessary to choose the right size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfavourable sensations.



K/D	L/R	XS	S	M	L	XL
cm		30-33	33-36	36-40	40-44	44-46

Dėvėjimas.

- Įtvarą dėvėkite ant kelio sąnario taip, kad išskirtimas su atrama fiksuotų kelio girnelę.
- Užsekite apimtį reguliuojančias juosteles.

Directions for use:

- Place the orthosis on the knee joint in the position where the split with the pad fix the kneecap.
- Fasten the size-adjusting strips.

Rekomendacijos:

Dėl įtvoro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvoro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti ne aukštesnės kaip 40°C temperatūros vandenyje švelniomis skalbimo priemonėmis. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 40°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir tikimės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-03-16